



Protocolos sugeridos BioPlus®



Assessoria LaborLab.

Versão 3.06.20



Índice

Acido Urico	3.
Albumina	4.
Amilase	5.
Bilirrubina Direta	6.
Bilirrubina Total.....	7.
Calcio Arsenazo	8.
CKMB	9.
CPK.....	10.
Colesterol	11.
Colinesterase	12.
Creatinina	13.
Ferro	14.
Fosfatase Alcalina	15.
Fosforo.....	16.
Gama GT.....	17.
Glicose	18.
Lactato	19.
Lipase	20.
TGO (AST)	21.
TGP (ALT).....	22.
LDH.....	23.
Magnésio	24.
PCR.....	25.
PCR Ultrasensível.....	26.
Proteína Total.....	27.
Proteína Total Urinária	28.



Triglicérides	29.
Uréia	30.



ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uric Acid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
 M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>20</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.160</u>
ABS PAD MIN	<u>0.000</u>
ABS PAD MAX	<u>0.300</u>
VR/VN MIN	<u>2,5</u>
VR/VN MAX	<u>7,0</u>



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: ALBUMIN

Código: 1770010

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>620</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>g/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>8</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.300</u>
ABS PAD MIN	<u>0.200</u>
ABS PAD MAX	<u>0.400</u>
VR/VN MIN	<u>3,5</u>
VR/VN MAX	<u>5,5</u>



AMILASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Amylase

Código: 1770020

Apresentação: RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>405</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>30</u>
PAD.....	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>3953</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>1</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.250</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>2000</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.300</u>
VR/VN MIN	<u>3,5</u>
VR/VN MAX	<u>5,5</u>



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>546</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>SIM/SIM</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>12</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.160</u>
ABS PAD MIN	<u>0.000</u>
ABS PAD MAX	<u>0.300</u>
VR/VN MIN	<u>0</u>
VR/VN MAX	<u>0,4</u>



BILIRRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL

Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL

Até 48hs 3,4 a 11,5 mg/dL

Do 3º a 5º dia 1,5 a 12,0 mg/dL

Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>546</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>SIM/SIM</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>2</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>30</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.160</u>
ABS PAD MIN	<u>0.000</u>
ABS PAD MAX	<u>0.300</u>
VR/VN MIN	<u>0</u>
VR/VN MAX	<u>1,0</u>



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Cálcio Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL
Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>578</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>15</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.200</u>
ABS PAD MIN	<u>0.455</u>
ABS PAD MAX	<u>0.505</u>
VR/VN MIN	<u>8,8</u>
VR/VN MAX	<u>11,0</u>



CK MB

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Ck MB

Código: 1770060

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>300</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>8254</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>3</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>60</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.100</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>500</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.800</u>
VR/VN MIN	<u>0,00</u>
VR/VN MAX	<u>25,0</u>



CPK

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CK Nac

Código: 1770070

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L
M até 170 U/L

Linearidade: 1800 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>120</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>8095</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>20</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>4</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.240</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>1800</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.800</u>
VR/VN MIN	<u>0,0</u>
VR/VN MAX	<u>195</u>



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Colesterol COD-PAD Liquid Stable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL
Limiar elevado 200-239 mg/dL
Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

- (*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.
- (**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
- @ Paramento será calculado pelo equipamento.
- N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>500</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>0.300</u>
ABS PAD MIN	<u>0.300</u>
ABS PAD MAX	<u>0.400</u>
VR/VN MIN	<u>0,0</u>
VR/VN MAX	<u>200</u>



COLINESTERASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab:

Colinesterase

Código: 1770570

Apresentação: 1x25ml +1x5ml

NOTAS

Reativo de trabalho:

Reconstituir conforme as instruções de uso do kit.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Fator

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Homem: 5500 a 13400 U/L

Mulher: 4400 a 11700 U/L

Linearidade: 8890 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>405</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>3</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>2271</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>30</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.155</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>18000</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>3.000</u>
VR/VN MIN	<u>5500</u>
VR/VN MAX	<u>13400</u>

Obs.: Multiplicar o resultado final por 10.



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Creatinine

Código: 1770100

Apresentação: RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL
Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>TF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>30</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dl</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0,00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>9,0</u>
ABS REAT MIN	<u>-0,100</u>
ABS REAT MAX	<u>0,200</u>
ABS PAD MIN	<u>0,100</u>
ABS PAD MAX	<u>0,400</u>
VR/VN MIN	<u>0,7</u>
VR/VN MAX	<u>1,20</u>



FERRO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Iron

Código: 1770180

Apresentação: RA:1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: M 65 – 175 ug/dL
H 60 – 170 ug/dL

Linearidade: 1000 ug/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>546</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>ug/dL</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>500</u>
ABS REAT MIN	<u>-0.100</u>
ABS REAT MAX	<u>-0.300</u>
ABS PAD MIN	<u>-0.100</u>
ABS PAD MAX	<u>0.800</u>
VR/VN MIN	<u>60</u>
VR/VN MAX	<u>170</u>



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Preparar Reativo de Trabalho. Misturar 4 partes do RA com 1 parte do RB.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>405</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>20</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>6812</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.200</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>1.500</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>1.000</u>
VR/VN MIN	<u>27</u>
VR/VN MAX	<u>100</u>



FOSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>12</u>
ABS REAT MIN	<u>0.00</u>
ABS REAT MAX	<u>0.500</u>
ABS PAD MIN	<u>0.150</u>
ABS PAD MAX	<u>0.350</u>
VR/VN MIN	<u>2,8</u>
VR/VN MAX	<u>4,8</u>



GAMA GT

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Gama Glutamil Transferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>405</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>3</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>1616</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.155</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>1.200</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>1.300</u>
VR/VN MIN	<u>11</u>
VR/VN MAX	<u>50</u>



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia:	50 a 80 mg/dL
Neonatos:	40 a 60 mg/dL
Crianças:	60 a 100 mg/dL
Adulto:	74 a 106 mg/dL
Urina isolada:	1 a 15mg/dL
Urina 24horas:	<0,5 g/24hs
LCR:	Crianças 60 a 80 mg/dL Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>500</u>
ABS REAT MIN	<u>0.00</u>
ABS REAT MAX	<u>0.300</u>
ABS PAD MIN	<u>0.350</u>
ABS PAD MAX	<u>0.400</u>
VR/VN MIN	<u>65</u>
VR/VN MAX	<u>99</u>



LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

A 25®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>546</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>SIM/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>2</u>
LIM. LIN. MIN	<u>00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>130</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>2.160</u>
ABS PAD MIN	<u>0.000</u>
ABS PAD MAX	<u>0.300</u>
VR/VN MIN	<u>4,5</u>
VR/VN MAX	<u>19,8</u>



LIPASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Lipase

Código: 1770560

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 – 60 U/l

Linearidade: 130 U/l

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

A 25®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>550</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>90</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>U/I</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>1</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.200</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>DECR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>300</u>
ABS REAT MIN	<u>0.800</u>
ABS REAT MAX	<u>1.800</u>
VR/VN MIN	<u>13</u>
VR/VN MAX	<u>60</u>



TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>60</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>1746</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.200</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>DECR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>600</u>
ABS REAT MIN	<u>0.800</u>
ABS REAT MAX	<u>1.800</u>
VR/VN MIN	<u>11</u>
VR/VN MAX	<u>39</u>



TGP (ALT)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>60</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>1746</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.220</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>DECR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>600</u>
ABS REAT MIN	<u>0.800</u>
ABS REAT MAX	<u>1.800</u>
VR/VN MIN	<u>11</u>
VR/VN MAX	<u>45</u>



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: LDH-P
Liquid Stable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>CIN</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>30</u>
PADRAO	<u>NÃO</u>
FATOR	<u>8095</u>
UNID	<u>U/L</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
IMPRESSÃO.....	<u>EXTENSA</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
Nº INTERVALOS.....	<u>3</u>
ΔA/MIN.....	<u>0.155</u>
% LIM. LIN.....	<u>10</u>
DIR.....	<u>DECR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0.000</u>
LIM. LIN. MAX	<u>1000</u>
ABS REAT MIN	<u>0.00</u>
ABS REAT MAX	<u>1.300</u>
VR/VN MIN	<u>80</u>
VR/VN MAX	<u>240</u>



MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>2,5</u>
ABS REAT MIN	<u>0,00</u>
ABS REAT MAX	<u>0,200</u>
ABS PAD MIN	<u>0,500</u>
ABS PAD MAX	<u>1,500</u>
VR/VN MIN	<u>1,9</u>
VR/VN MAX	<u>2,5</u>



PCR

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>TF</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>500</u>
PADRAO	<u>MULTIPADRÃO</u>
PAD. (QUANT)	<u>6</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dl</u>
DECIMAIS	<u>2</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0,00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>50,0</u>
ABS REAT MIN	<u>-0,100</u>
ABS REAT MAX	<u>1,000</u>
ABS PAD MIN	<u>0,100</u>
ABS PAD MAX	<u>2,000</u>
VR/VN MIN	<u>0,00</u>
VR/VN MAX	<u>0,50</u>



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HS PCR

Código: 1770170

Apresentação: RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Necessário realizar pré diluição 1:4 das amostras.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

Immunology Control Level 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade:

20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>TF</u>
WL1	<u>578</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>500</u>
PADRAO	<u>MULTIPADRÃO</u>
PAD. (QUANT)	<u>6</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dl</u>
DECIMAIS	<u>2</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>60</u>
DIR.....	<u>INCR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0,00</u>
LIM. LIN. MAX	<u>50,0</u>
ABS REAT MIN	<u>-0,100</u>
ABS REAT MAX	<u>1,000</u>
ABS PAD MIN	<u>0,100</u>
ABS PAD MAX	<u>2,000</u>
VR/VN MIN	<u>0,00</u>
VR/VN MAX	<u>0,50</u>



PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prolat

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>546</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>g/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>12</u>
ABS REAT MIN	<u>0.00</u>
ABS REAT MAX	<u>0.800</u>
ABS PAD MIN	<u>0.050</u>
ABS PAD MAX	<u>1.000</u>
VR/VN MIN	<u>6,8</u>
VR/VN MAX	<u>8,0</u>



PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL

U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>600</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>1</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>300</u>
ABS REAT MIN	<u>0.000</u>
ABS REAT MAX	<u>1.000</u>
ABS PAD MIN	<u>0.001</u>
ABS PAD MAX	<u>3.000</u>
VR/VN MIN	<u>1</u>
VR/VN MAX	<u>15</u>



TRIGLICÉRIDOS

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Triglicérides GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável:	<150 mg/dL
Limiar alto:	150-199 mg/dL
Elevado:	200-499 mg/dL
Muito elevado:	> 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>PF</u>
WL1	<u>505</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>SIM</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>003</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dL</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>1500</u>
ABS REAT MIN	<u>0.100</u>
ABS REAT MAX	<u>0.300</u>
ABS PAD MIN	<u>0.200</u>
ABS PAD MAX	<u>0.400</u>
VR/VN MIN	<u>0</u>
VR/VN MAX	<u>150</u>



URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uréia UV Liquid Stable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 13 a 43 mg/dL
Urina: 26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A. - Não se Aplica.

BioPlus ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Modo	<u>T.F</u>
WL1	<u>340</u>
WL2	<u>N.A.</u>
Blank?	<u>NÃO</u>
BLK-Amos/PAD?	<u>NÃO/NÃO</u>
CUB. FLUXO	<u>SIM</u>
TEMP	<u>37°C</u>
VOL. ASP.	<u>500</u>
RETARDO	<u>60</u>
PADRAO	<u>SIM</u>
PAD. (QUANT)	<u>UNICA</u>
P1	<u>**</u>
UNID	<u>mg/dl</u>
DECIMAIS	<u>0</u>
INT. CINÉTICO.....	<u>120</u>
DIR.....	<u>DECR</u>
LIM. LIN. MIN	<u>0</u>
LIM. LIN. MAX	<u>300</u>
ABS REAT MIN	<u>-1.00</u>
ABS REAT MAX	<u>1.00</u>
ABS PAD MIN	<u>0.100</u>
ABS PAD MAX	<u>1.00</u>
VR/VN MIN	<u>0,7</u>
VR/VN MAX	<u>1,20</u>