



## Protocolos sugeridos CM 200/ CM 250/ Metrolab 2300®



Assessoria LaborLab.

Versão 2.06.20

Os protocolos aqui descritos, devem ser validados com os ensaios correspondentes e seu desempenho deverá ser verificado com uma adequada planificação e execução sistemática do controle de qualidade.



## Índice

<b>Acido Urico .....</b>	3.
<b>Albumina .....</b>	4.
<b>Amilase .....</b>	5.
<b>Bilirrubina Direta .....</b>	6.
<b>Bilirrubina Total.....</b>	7.
<b>Calcio Arsenazo .....</b>	8.
<b>CKMB .....</b>	9.
<b>CPK.....</b>	10.
<b>Cloro .....</b>	11.
<b>Colesterol .....</b>	12.
<b>Creatinina .....</b>	13.
<b>Ferro .....</b>	14.
<b>Ferritina .....</b>	15.
<b>Fosfatase Alcalina .....</b>	16.
<b>Fosforo.....</b>	17.
<b>Gama GT.....</b>	18.
<b>Glicose .....</b>	19.
<b>Lactato .....</b>	20.
<b>Lipase .....</b>	21.
<b>TGO (AST) .....</b>	22.
<b>TGP (ALT).....</b>	23.
<b>HDL Colesterol .....</b>	24.
<b>LDH.....</b>	25.
<b>Magnésio .....</b>	26.
<b>Microalbumina .....</b>	27.
<b>PCR.....</b>	28.
<b>PCR Ultrasensível.....</b>	29.



<b>Proteína Total.....</b>	30.
<b>Proteína Total Urinária .....</b>	31.
<b>Triglicérides .....</b>	32.
<b>Uréia .....</b>	33.



## ÁCIDO URICO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** UricAcid

**Código:** 1770310

**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL  
RB: 1 x 12mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma heparinizado.

**Calibração:**

# Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos            H: 2,5 a 6,0 mg/dL  
                    M: 2,6 a 5,0 mg/dL

**Linearidade:** 20 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>ACU</u>
Nome .....	<u>AcidoUrico</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>505</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>4</u>
1º Reativo .....	<u>160</u>
2º Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>20</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,3</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## ALBUMINA

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** ALBUMIN

**Código:** 1770010

**Apresentação:** RA: 1 x 250 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro.

**Calibração:**

# Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

**Linearidade:** 7 g/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Alb</u>
Nome .....	<u>Albumina</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>g/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>550</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>400</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>2</u>
Superior .....	<u>5</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,5</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## AMILASE

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Amylase

**Código:** 1770020

**Apresentação:** RA: 2 x 30 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma heparinizado.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: 0 a 125 U/L

**Linearidade:** 2000 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Amil</u>
Nome .....	<u>Amilase</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>405</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>5</u>
1° Reativo .....	<u>200</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>60</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>0</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>2500</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## BILIRRUBINA DIRETA

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Bilirubin D

**Código:** 1770030

**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL  
RB: 1 x 16 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: até 0,4 mg/dL

**Linearidade:** 12 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL) @ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Bili D</u>
Nome .....	<u>Bili Direta</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>550</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>16</u>
1° Reativo .....	<u>200</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>60</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>10</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Não</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## BILIRUBINA TOTAL

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Bilirubin T

**Código:** 1770040

**Apresentação:** RA: 1 x 80 mL  
RB: 1 x 16 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL

Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL

Até 48hs 3,4 a 11,5 mg/dL

Do 3º a 5º dia 1,5 a 12,0 mg/dL

Adultos: até 1,0 mg/dL

#### Linearidade:

30 mg/dL

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Bili T</u>
Nome .....	<u>Bili Total</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>550</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>6</u>
1º Reativo .....	<u>200</u>
2º Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>30</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>30</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Não</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## CÁLCIO ARSENAZO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Cálcio Arsenazo

**Código:** 1770050

**Apresentação:** RA: 2 x 50 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL  
Urina: até 300 mg/24hs

**Linearidade:** 20 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários*

Sigla .....	<u>Ca</u>
Nome .....	<u>Calcio</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>650</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>300</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>240</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>4</u>
Superior .....	<u>15</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>0,8</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## CK MB

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Ck MB

**Código:** 1770060

**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL  
RB: 1 x 10 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

Controle do Kit

**Valores de Referência:**

Adultos: 0 a 25 U/L

**Linearidade:** 500 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>CKMB</u>
Nome .....	<u>CKMB</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>12</u>
1° Reativo .....	<u>250</u>
2° Reativo .....	<u>50</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>0</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0,1</u>
Superior .....	<u>500</u>
Consumo .....	<u>0,15</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,6</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## CPK

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** CK Nac

**Código:** 1770070

**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL  
RB: 1 x 10 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Adultos: H até 195 U/L  
M até 170 U/L

#### Linearidade:

1800 U/L

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>CK</u>
Nome .....	<u>CK</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>6</u>
1° Reativo .....	<u>225</u>
2° Reativo .....	<u>45</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>0</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0,1</u>
Superior .....	<u>2000</u>
Consumo .....	<u>0,3</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>0,4</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## CLORO

### APRESENTAÇÃO

**Referência Biotécnica:** Cloreto

**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

# Padrão

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adulto: 95 a 105

**Linearidade:** 130 mEq/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Cloro</u>
Nome .....	<u>Cloro</u>
Marca .....	<u>Biotécnica</u>
Unidade .....	<u>mEq/L</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>505</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>300</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>200</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,25</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## COLESTEROL

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Colesterol COD-PAD LiquidStable

**Código:** 1770080

**Apresentação:** RA: 2 x 100 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

# Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Desejável:	< 200 mg/dL
Limiar elevado	200-239 mg/dL
Elevado:	240 mg/dL

**Linearidade:** 500 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Col</u>
Nome .....	<u>Colesterol</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>505</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>300</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>450</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,25</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## CREATININA

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Creatinine

**Código:** 1770100

**Apresentação:** RA: 2 x 100 mL  
RB: 2 x 25 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL

Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

**Linearidade:** 9,0 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Crea</u>
Nome .....	<u>Creatinina</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Cinetica 2 pont</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>505</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>20</u>
1° Reativo .....	<u>160</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>45</u>
Intervalo .....	<u>60</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>3</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0,2</u>
Superior .....	<u>20</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>2</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,3</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>

## FERRO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Iron

**Código:** 1770180

**Apresentação:** RA:1 x 80 mL  
RB: 1 x 16 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Adulto: M 65 – 175 ug/dL  
H 60 – 170 ug/dL

#### Linearidade:

1000 ug/dL

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Fe</u>
Nome .....	<u>Ferro</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>40</u>
1° Reativo .....	<u>200</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>15</u>
Incubação .....	<u>420</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>5</u>
Superior .....	<u>1500</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,1</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## FERRITINA

### APRESENTAÇÃO

**Referência Labor Lab:** Ferritin

**Apresentação:** RA:1 x 40 mL  
RB: 1 x 10 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.  
RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Cal Ferritina

**Controle de Qualidade:**

Controle Ferritina

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Ferr</u>
Nome .....	<u>Ferritina</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>ug/L</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>40</u>
1° Reativo .....	<u>200</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>15</u>
Incubação .....	<u>420</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>5</u>
Superior .....	<u>1500</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,1</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## FOSFATASE ALCALINA

### APRESENTAÇÃO

#### Referência LaborLab:

AlkalinePhosphatase

**Código:** 1770110

**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL  
RB: 2 x 12 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

**Linearidade:** 1500 U/L

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

*do Analisador é marca registrada de seus proprietários*

Sigla .....	<u>Fal</u>
Nome .....	<u>Fosfatase Al</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>405</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>4</u>
1° Reativo .....	<u>160</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>120</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>4</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>1200</u>
Consumo .....	<u>0,3</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>0,5</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## FOSFORO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Phosphorus

**Código:** 1770250

**Apresentação:** RA: 1 x 100 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL  
Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

**Linearidade:** 16 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

**Sigla** ..... Fosf  
**Nome** ..... Fosforo  
**Marca** ..... LaborLab

**Unidade** ..... mg/dL  
**Tipo** ..... Color

**Long. De Onda (NM)**

**Principal** ..... 340  
**Bi cromática** ..... 750

**Volumes (ul)**

**Amostra** ..... 3  
**1º Reativo** ..... 300  
**2º Reativo** ..... 0  
**Referencia** ..... Fator/Calib

**Tempos (seg)**

**2º Reativo** ..... 0  
**Incubação** ..... 300

**Duração em Dias**

**Calibração** ..... 7  
**Branco** ..... 1

**Limites**

**Inferior** ..... 1  
**Superior** ..... 20  
**Direção da Reação** ..... Ascendente

**Calculo**

**Pendente** ..... 1  
**Interseção** ..... 0  
**Decimal** ..... 1

**Abs. Inicial**

**Minima** ..... 0  
**Maxima** ..... 0,5  
**Cálculo do Fator** ..... Substituição

**Reativos**

**Integridade** ..... Sim  
**Branco** ..... Sim



## GAMA GT

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Gama Glutamilo Transferase.

**Código:** 1770120

**Apresentação:** RA: 1 x 48 mL  
RB: 1 x 12 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: M: 7-32 U/L  
H: 11-50 U/L

**Linearidade:** 1200 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>GGT</u>
Nome .....	<u>Gama GT</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>405</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>10</u>
1° Reativo .....	<u>160</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>120</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>21</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>1300</u>
Consumo .....	<u>0,7</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>1,5</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## GLICOSE

### APRESENTAÇÃO

**ReferênciaLaborLab:** Glicose GOD PAP Liquid Stable.

**Código:** 1770130

**Apresentação:** RA: 2 x 250 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

0 a 1 dia:	50 a 80 mg/dL
Neonatos:	40 a 60 mg/dL
Crianças:	60 a 100 mg/dL
Adulto:	74 a 106 mg/dL
Urina isolada:	1 a 15mg/dL
Urina 24horas:	<0,5 g/24hs
LCR:	Crianças 60 a 80 mg/dL Adultos 40 a 70 mg/dL

**Linearidade:** 500 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

**Sigla** ..... Gli

**Nome** ..... Glicose

**Marca** ..... LaborLab

**Unidade** ..... mg/dL

**Tipo** ..... Color

**Long. De Onda (NM)**

**Principal** ..... 505

**Bi cromática** ..... 750

**Volumes (ul)**

**Amostra** ..... 3

**1º Reativo** ..... 400

**2º Reativo** ..... 0

**Referencia** ..... Fator/Calib

**Tempos (seg)**

**2º Reativo** ..... 0

**Incubação** ..... 300

**Duração em Dias**

**Calibração** ..... 7

**Branco** ..... 1

**Limites**

**Inferior** ..... 10

**Superior** ..... 450

**Direção da Reação** ..... Ascendente

**Calculo**

**Pendente** ..... 1

**Interseção** ..... 0

**Decimal** ..... 0

**Abs. Inicial**

**Minima** ..... -0,1

**Maxima** ..... 0,25

**Cálculo do Fator** ..... Substituição

**Reativos**

**Integridade** ..... Sim

**Branco** ..... Sim



## LACTATO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Lactate

**Código:** 1770200

**Apresentação:** RA: 1 x 60 mL  
RB: 1 x 12 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

**Linearidade:** 130 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Lact</u>
Nome .....	<u>Lactato</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>550</u>
Bi cromática .....	<u>700</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>250</u>
2° Reativo .....	<u>50</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>120</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>30</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>4</u>
Superior .....	<u>110</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,85</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## LIPASE

### APRESENTAÇÃO

**Referência Labor Lab:** Lipase

**Código:**

**Apresentação:** RA: 1 x 20 mL  
RB: 1 x 12 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: 13 a 60 U/L

**Linearidade:** 300 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Lipase</u>
Nome .....	<u>Lipase</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>550</u>
Bi cromática .....	<u>700</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>250</u>
2° Reativo .....	<u>50</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>120</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>30</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>4</u>
Superior .....	<u>110</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,85</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## TGO (AST)

### APRESENTAÇÃO

**ReferênciaLaborLab:** GOT (AST)  
Liquid Stable.

**Código:** 1770140

**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL  
RB: 2 x 12 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.  
RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: M até 32 U/L  
H até 38 U/L

**Linearidade:** 600 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>TGO</u>
Nome .....	<u>TGO</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>20</u>
1° Reativo .....	<u>160</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>150</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>0</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>350</u>
Consumo .....	<u>0,15</u>
Direção da Reação .....	<u>Decrescente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0,8</u>
Maxima .....	<u>2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## TGP (ALT)

### APRESENTAÇÃO

**ReferênciaLaborLab:** GPT (ALT)  
Liquid Stable.

**Código:** 1770150

**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL  
RB: 2 x 12 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.  
RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: M até 31 U/L  
H até 41 U/L

**Linearidade:** 600 U/L

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>TGP</u>
Nome .....	<u>TGP</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>20</u>
1° Reativo .....	<u>160</u>
2° Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>150</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>0</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>350</u>
Consumo .....	<u>0,12</u>
Direção da Reação .....	<u>Decrescente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0,8</u>
Maxima .....	<u>2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>

## HDL COLESTEROL

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** HDL Colesterol Direto.

**Código:** 1770160

**Apresentação:** RA: 1 x 60 mL  
RB: 1 x 20 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

# Próprio do Kit

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL  
Elevado (desejado): 60 mg/dL

#### Linearidade:

200 mg/dL

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>HDL</u>
Nome .....	<u>HDL Col</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1º Reativo .....	<u>300</u>
2º Reativo .....	<u>100</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>500</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>200</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>-1,0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,3</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>

## LDH

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** LDH-P  
LiquidStable

**Código:** 1770210

**Apresentação:** RA: 2 x 48 mL  
RB: 2 x 12 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.  
RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

#### Linearidade:

1000 U/L

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>LDH</u>
Nome .....	<u>LDH</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>U/L</u>
Tipo .....	<u>Cinética Rápida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (uL)</b>	
Amostra .....	<u>5</u>
1º Reativo .....	<u>160</u>
2º Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>120</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>1500</u>
Consumo .....	<u>0,16</u>
Direção da Reação .....	<u>Decrescente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Minima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0,7</u>
Maxima .....	<u>2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## MAGNÉSIO

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Magnesium

**Código:** 1770220

**Apresentação:** RA: 2 x 50 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

#### Linearidade:

6,0 mg/dL

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla ..... Mg

Nome ..... Magnesio

Marca ..... LaborLab

Unidade ..... mg/dL

Tipo ..... Color

#### Long. De Onda (NM)

Principal ..... 505

Bi cromática ..... 600

#### Volumes (ul)

Amostra ..... 3

1° Reativo ..... 300

2° Reativo ..... 0

Referencia ..... Fator/Calib

#### Tempos (seg)

2° Reativo ..... 0

Incubação ..... 180

#### Duração em Dias

Calibração ..... 1

Branco ..... 1

#### Limites

Inferior ..... 0,5

Superior ..... 5

Direção da Reação ..... Ascendente

#### Calculo

Pendente ..... 1

Interseção ..... 0

Decimal ..... 1

#### Abs. Inicial

Minima ..... -1,2

Maxima ..... 1,5

Cálculo do Fator ..... Substituição

#### Reativos

Integridade ..... Sim

Branco ..... Sim



## MICROALBUMINA

### APRESENTAÇÃO

#### Referência Labor Lab:

Microalbumina

#### Apresentação:

RA: 1 x 4 mL  
RB: 1 x 10 mL

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Urina

#### Calibração:

#Microalbumina Calibrador

#### Controle de Qualidade:

Microalbumina Controle

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

*O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários*

Sigla .....	<u>MALB</u>
Nome .....	<u>Microalbumina</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/L</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>600</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>300</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Curva</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>*</u>
Incubação .....	<u>*</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>1</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0,5</u>
Superior .....	<u>5</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-1,2</u>
Maxima .....	<u>1,5</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>

## PCR

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** CRP

**Código:** 1770240

**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL  
RB: 1 x 10 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

# CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

**Controle de Qualidade:**

ImmunologyControlLevel 1

**Valores de Referência:**

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

**Linearidade:** 20 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parametro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

*é marca registrada de seus proprietários*

Sigla .....	<u>PCR</u>
Nome .....	<u>PCR</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Ponto Final</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>20</u>
1º Reativo .....	<u>200</u>
2º Reativo .....	<u>40</u>
Referencia .....	<u>Curva</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>300</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>15</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>0</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>0,2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>



## PCR ULTRASENSÍVEL

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** HS PCR

**Código:** 1770170

**Apresentação:** RA: 1 x 20 mL  
RB: 1 X 20 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

# CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

**Controle de Qualidade:**

ImmunologyControlLevel 1

**Valores de Referência:**

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

**Linearidade:** 20 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>PCR HS</u>
Nome .....	<u>PCR HS</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Cinetica 2 Pont</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>5</u>
1° Reativo .....	<u>130</u>
2° Reativo .....	<u>130</u>
Referencia .....	<u>Curva</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>180</u>
Incubação .....	<u>30</u>
Intervalo .....	<u>180</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>30</u>
Branco .....	<u>0</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>160</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>1</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0</u>
Maxima .....	<u>1,2</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Não</u>
Diluição Soro.....	<u>4:1</u>



## PROTEÍNA TOTAL

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Protal

**Código:** 1770260

**Apresentação:** RA: 1 x 250 m

### NOTAS

#### Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

#### Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

#### Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

#### Amostra:

Soro.

#### Calibração:

#Labor Cal

#### Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

#### Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

#### Linearidade:

17 mg/dL

#### Legenda:

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL) @ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla ..... PT

Nome ..... Prot. Total

Marca ..... LaborLab

Unidade ..... g/dL

Tipo ..... Color

#### Long. De Onda (NM)

Principal ..... 550

Bi cromática ..... 750

#### Volumes (ul)

Amostra ..... 5

1° Reativo ..... 250

2° Reativo ..... 0

Referencia ..... Fator/Calib

#### Tempos (seg)

2° Reativo ..... 0

Incubação ..... 300

#### Duração em Dias

Calibração ..... 7

Branco ..... 1

#### Limites

Inferior ..... 3

Superior ..... 10

Direção da Reação ..... Ascendente

#### Calculo

Pendente ..... 1

Interseção ..... 0

Decimal ..... 1

#### Abs. Inicial

Minima ..... -0,5

Maxima ..... 0,3

Cálculo do Fator ..... Substituição

#### Reativos

Integridade ..... Sim

Branco ..... Sim



## PROTEÍNA URINÁRIA

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Prot U/LCR

**Código:**

**Apresentação:** RA: 4 x 20 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Urina ou LCR.

**Calibração:**

# Próprio (kit)

**Controle de Qualidade:**

Prot U/LCR Controles

**Valores de Referência:**

Urina:	1 a 15 mg/dL
U. 24 horas:	28 a 141 mg/24 horas

**Linearidade:** 300 mg/dL

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>PTU</u>
Nome .....	<u>Prot. Urina</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>590</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>4</u>
1° Reativo .....	<u>200</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>200</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,3</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>



## TRIGLICÉRIDES

### APRESENTAÇÃO

**ReferênciaLaborLab:** Triglicérides GOD PAP Líquid Stable.

**Código:** 1770290

**Apresentação:** RA: 2 x 100 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl 1 e 2

**Valores de Referência:**

Desejável:	<150 mg/dL
Limiar alto:	150-199 mg/dL
Elevado:	200-499 mg/dL
Muito elevado:	> 500 mg/dL

**Linearidade:** 1000 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>TRI</u>
Nome .....	<u>Triglicerides</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>Color</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>505</u>
Bi cromática .....	<u>750</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>3</u>
1° Reativo .....	<u>300</u>
2° Reativo .....	<u>0</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2° Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>300</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>1500</u>
Direção da Reação .....	<u>Ascendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>-0,1</u>
Maxima .....	<u>0,25</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>

## URÉIA

### APRESENTAÇÃO

**Referência LaborLab:** Uréia UVLiquidStable.

**Código:** 1770300

**Apresentação:** RA: 2 x 80 mL  
RB: 2 x 20 mL

### NOTAS

**Reativo de trabalho:**

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

**Instruções de Uso:**

Vide Instruções de uso do Kit.

**Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

**Amostra:**

Soro ou plasma.

**Calibração:**

#Labor Cal

**Controle de Qualidade:**

LaborControl1 e 2

**Valores de Referência:**

Adultos: 13 a 43 mg/dL  
Urina: 26 a 43 g/24hs

**Linearidade:** 300 mg/dL

**Legenda:**

(\*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(\*\*) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)  
@ Paramento será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

## CM 200/CM 250/ Metrolab 2300®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Sigla .....	<u>Ureia</u>
Nome .....	<u>Ureia</u>
Marca .....	<u>LaborLab</u>
Unidade .....	<u>mg/dL</u>
Tipo .....	<u>CineticaRapida</u>
<b>Long. De Onda (NM)</b>	
Principal .....	<u>340</u>
Bi cromática .....	<u>0</u>
<b>Volumes (ul)</b>	
Amostra .....	<u>4</u>
1º Reativo .....	<u>200</u>
2º Reativo .....	<u>50</u>
Referencia .....	<u>Fator/Calib</u>
<b>Tempos (seg)</b>	
2º Reativo .....	<u>0</u>
Incubação .....	<u>60</u>
Intervalo .....	<u>0</u>
<b>Duração em Dias</b>	
Calibração .....	<u>7</u>
Branco .....	<u>1</u>
<b>Limites</b>	
Inferior .....	<u>0</u>
Superior .....	<u>450</u>
Consumo .....	<u>0,4</u>
Direção da Reação .....	<u>Descendente</u>
<b>Calculo</b>	
Pendente .....	<u>1</u>
Interseção .....	<u>0</u>
Decimal .....	<u>0</u>
Correlação Mínima .....	<u>0,98</u>
<b>Abs. Inicial</b>	
Minima .....	<u>0,95</u>
Maxima .....	<u>2,3</u>
Cálculo do Fator .....	<u>Substituição</u>
<b>Reativos</b>	
Integridade .....	<u>Sim</u>
Branco .....	<u>Sim</u>