



CMD Serum Standard

Para a calibração da determinação de sódio, potássio e cloreto em soro ou plasma

APLICAÇÕES

CMD Serum Standard é utilizado como calibrador em analisadores automáticos de química clínica com módulo ISE, para a determinação de sódio, potássio e cloreto em amostras de soro ou plasma pelo método de eletrodo íon-seletivo. Consultar os valores estabelecidos nos rótulos, visto que variam de acordo com o lote.

REAGENTES FORNECIDOS

Calibrador 1: solução contendo concentrações baixas de cloreto de sódio e cloreto de potássio.

Calibrador 2: solução contendo concentrações altas de cloreto de sódio e cloreto de potássio.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso.

PRECAUÇÕES

O Reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar ingestão e o contato com a pele.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Reagentes Fornecidos: são estáveis à temperatura ambiente (2-30°C) até a data de vencimento indicada na embalagem.

APRESENTAÇÃO

- 2 x 100 ml (Cód. 1009662)

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Conteúdo suficiente para <n> testes



Data de validade



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Risco biológico



Volume após da reconstituição



Conteúdo



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Caústico



Irritante



Consultar as instruções de uso



Calibrador



Controle



Controle Positivo



Controle Negativo



Número de catálogo

■ Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente Laborlab:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br

Wiener lab.
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2162 0200
saw@wiener-lab.com.br
www.wiener-lab.com.br

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.