

Finalidade

Para a calibração da determinação de fator reumatoide (FR) pelos métodos imunoturbidimétricos.

Aplicações

O **RF Calibrator** foi desenvolvido para ser utilizado com os reagentes imunoturbidimétricos de Laborlab. Consultar o valor estabelecido no rótulo, visto que o mesmo é lote específico. Dito valor encontra-se padronizado com o padrão da World Health Organization (WHO).

Reagentes fornecidos

Calibrador: soro humano inativo com alta concentração de fator reumatoide diluído em solução fisiológica tamponada, com conservantes apropriados.

Instruções de uso

Calibrador: pronto para uso.

Precauções

O reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar a ingestão e contato com a pele.

O calibrador foi preparado partindo do material não reativo para HBsAg e HIV. Manipular o material como se tratando de uma amostra infectante.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

Estabilidade e instruções de armazenamento

Calibrador: estável sob refrigeração (2-10°C) até a data do vencimento indicada na embalagem.

Uma vez aberto é estável 30 dias sob refrigeração (2-10°C).

Apresentação

- 1 x 1 ml (Cód. 1770640)

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Européia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Conteúdo suficiente para <n> testes



Data de validade



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Risco biológico



Volume após da reconstituição



Conteúdo



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Caústico



Irritante



Consultar as instruções de uso



Calibrador



Controle



Controle Positivo



Controle Negativo



Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.

Fin y uso

Para la calibración de la determinación de factor reumatoideo (FR) por métodos inmunoturbidimétricos

Aplicaciones

El **RF Calibrator** está diseñado para ser usado con los reactivos inmunoturbidimétricos de Laborlab. Consultar el valor asignado en el rótulo, debido a que el mismo es lote específico. Dicho valor se encuentra estandarizado con respecto al standard de la World Health Organization (WHO).

Reactivos provistos

Calibrador: suero humano inactivado con alta concentración de factor reumatoideo, diluido en solución fisiológica tamponada, con conservadores apropiados.

Instrucciones para su uso

Calibrador: listo para usar.

Precauciones

El reactivo es para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar ingestión y contacto con la piel.

Este calibrador ha sido preparado a partir de material no reactivo para HBsAg y HIV. Sin embargo debe manejarse como si se tratara de una muestra infectiva.

Utilizar los reactivos guardando las precauciones habituales de trabajo en el laboratorio de química clínica.

Todos los reactivos y las muestras deben descartarse de acuerdo a la normativa local vigente.

Estabilidad e instrucciones de almacenamiento

Calibrador: estable en refrigerador (2-10°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Una vez abierto es estable 30 días refrigerado (2-10°C).

Presentación

- 1 x 1 ml (Cód. 1770640)

SIMBOLOS



Este producto cumple con los requerimientos previstos por la Directiva Europea 98/79 CE de productos sanitarios para el diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Uso diagnóstico "in vitro"



Contenido suficiente para <n> ensayos



Fecha de caducidad



Límite de temperatura (conservar a)



No congelar



Riesgo biológico



Volumen después de la reconstitución



Contenido



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Cáustico



Irritante



Consultar instrucciones de uso



Calibrador



Control



Control Positivo



Control Negativo



Número de catálogo