



CMD Urine Standard

Para a calibração da determinação de sódio, potássio e cloreto em urina

APLICAÇÕES

CMD Urine Standard é utilizado como calibrador em analisadores automáticos de química clínica com módulo ISE, para a determinação de sódio, potássio e cloreto em amostras de urina pelo método de eletrodo íon-seletivo. Consultar os valores estabelecidos nos rótulos.

REAGENTES FORNECIDOS

Calibrador 1: solução contendo concentrações baixas de cloreto de sódio e cloreto de potássio.

Calibrador 2: solução contendo concentrações altas de cloreto de sódio e cloreto de potássio.

INSTRUÇÕES DE USO

Pronto para uso.

PRECAUÇÕES

O Reagente é para uso diagnóstico "in vitro".

Evitar ingestão e o contato com a pele.

Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análises clínicas.

Todos os reagentes e as amostras devem ser descartados conforme a regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Reagentes Fornecidos: são estáveis a temperatura ambiente (2-30°C) até a data de vencimento indicada na embalagem.

APRESENTAÇÃO

- 2 x 100 ml (Cód. 1009663)

SÍMBOLOS



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Conteúdo suficiente para <n> testes



Data de validade



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Risco biológico



Volume após da reconstituição



Conteúdo



Número de lote



Elaborado por:



Nocivo



Corrosivo / Caústico



Irritante



Consultar as instruções de uso



Calibrador



Controle



Controle Positivo



Controle Negativo



Número de catálogo

Termo de garantia

Este Kit como um todo tem garantia de troca, desde que esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado pelo Departamento Técnico da Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda. que não houve falhas técnicas na execução e manuseio deste kit, assim como em sua conservação.

■ Laborlab Produtos para Laboratórios Ltda.
Estrada do Capão Bonito, 489
Guarulhos - SP - Brasil - CEP: 07263-010
CNPJ: 72.807.043/0001-94
Atendimento ao cliente Laborlab:
+55 (11) 2480 0529/+55 (11) 2499 1277
sac@laborlab.com.br
www.laborlab.com.br

Wiener lab.
Atendimento ao cliente:
+55 (11) 2162 0200
saw@wiener-lab.com.br
www.wiener-lab.com.br